

ESPACIADORES

ProCem

Hacelo vos mismo

IMPLANT

ProCem



www.implantca.com.ar

Molde *ProCem*

ESPACIADORES DE CADERA Y RODILLA

“Innovación y progreso para curar una infección.”


BENEFICIOS

- 1- Elaboración **IN SITU** (dentro del quirófano).
- 2- Posibilita la incorporación del antibiótico que el cirujano decida.
- 3- Liberación de antibióticos instantánea y asegurada.

A diferencia de los espaciadores fabricados en laboratorio, en los cuales el antibiótico se libera en la estiva del producto, PROCEM mejora el rendimiento de descarga antibiótica en el paciente.

- 4- Versatilidad en cada molde para confeccionar vástagos primarios y de revisión.
- 5- Optimizado para uso con cemento viscosidad estándar, sin pistola.

IMPLANT
ProCem

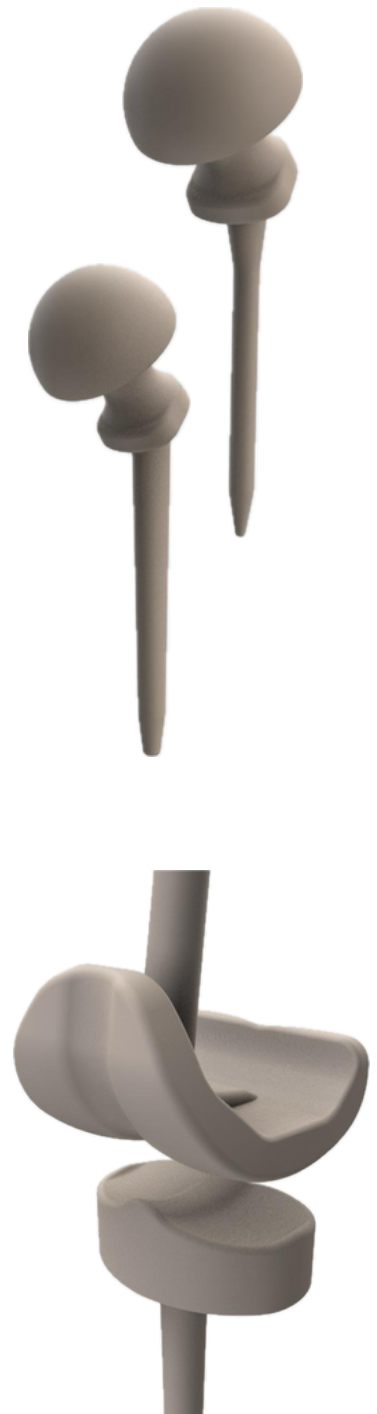

Molde *ProCem*


ESPACIADORES DE CADERA

OPCIONES DE MEDIDAS DISPONIBLES:

40 STD Y 40 Revisión
45 STD Y 45 Revisión
50 STD Y 50 Revisión
55 STD Y 55 Revisión

DOSIS DE CONSUMO DE CEMENTO X MEDIDA

| | |
|---------|-----------------|
| STD ø40 | 1 DOSIS |
| STD ø45 | 2 DOSIS |
| STD ø50 | 2 DOSIS |
| STD ø55 | 2 DOSIS/3 DOSIS |

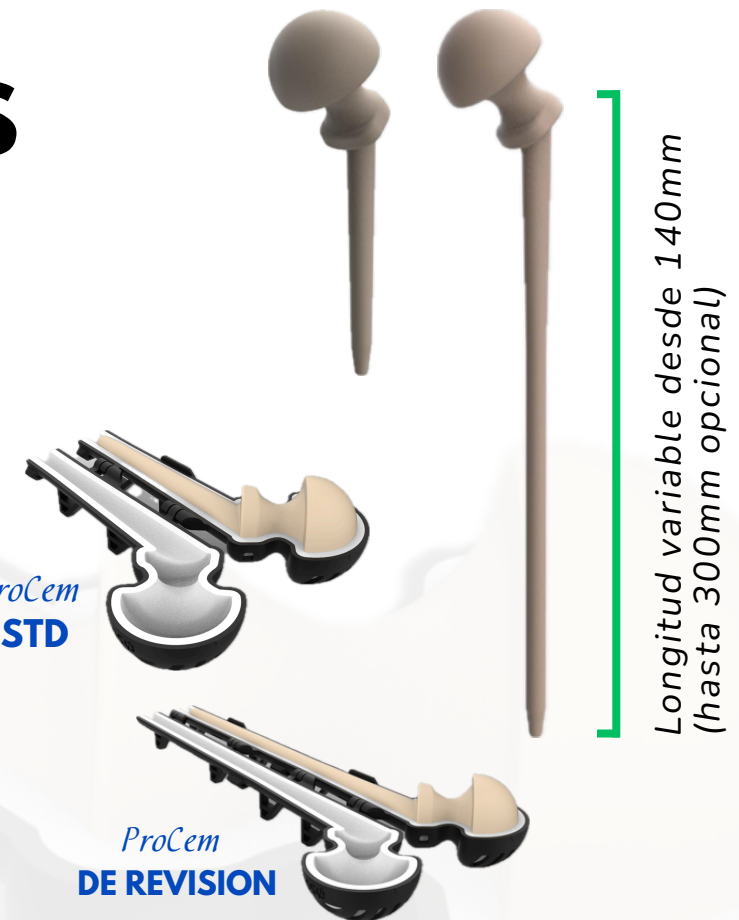

| | |
|--------------|---------|
| REVISION ø40 | 2 DOSIS |
| REVISION ø45 | 2 DOSIS |
| REVISION ø50 | 2 DOSIS |
| REVISION ø55 | 3 DOSIS |

IMPLANT

ProCem

Recomendación válida para DOSIS DE 40 g.



www.implantca.com.ar

Molde *ProCem*

ESPACIADORES DE RODILLA

OPCIONES DE MEDIDAS DISPONIBLES:

60mm TIBIAL y 60mm FEMORAL
65mm TIBIAL y 65mm FEMORAL
70mm TIBIAL y 70mm FEMORAL
75mm TIBIAL y 75mm FEMORAL

DOSIS DE CONSUMO DE CEMENTO X MEDIDA

| | | |
|--------------|------------------------|--------------------|
| FEMORAL 60mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 1 DOSIS 2 DOSIS |
| FEMORAL 65mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 3 DOSIS |
| FEMORAL 70mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 3 DOSIS |
| FEMORAL 75mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 3 DOSIS |

| | | |
|-------------|------------------------|--------------------|
| TIBIAL 60mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 2 DOSIS |
| TIBIAL 65mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 2 DOSIS |
| TIBIAL 70mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 3 DOSIS |
| TIBIAL 75mm | S/VASTAGO C/VASTAGO | 2 DOSIS 3 DOSIS |



Longitud variable desde 140mm
(hasta 300mm opcional)

IMPLANT

ProCem

Recomendación válida para DOSIS DE 40 g.



www.implantca.com.ar

IMPLANT
ProCem

ESPACIADORES

ProCem

“Hacelo vos mismo”

COMPANIA CERTIFICADA



www.implantca.com.ar