



ENSAMBLADO DEL ENDOBUTTON HTH

Paso a paso

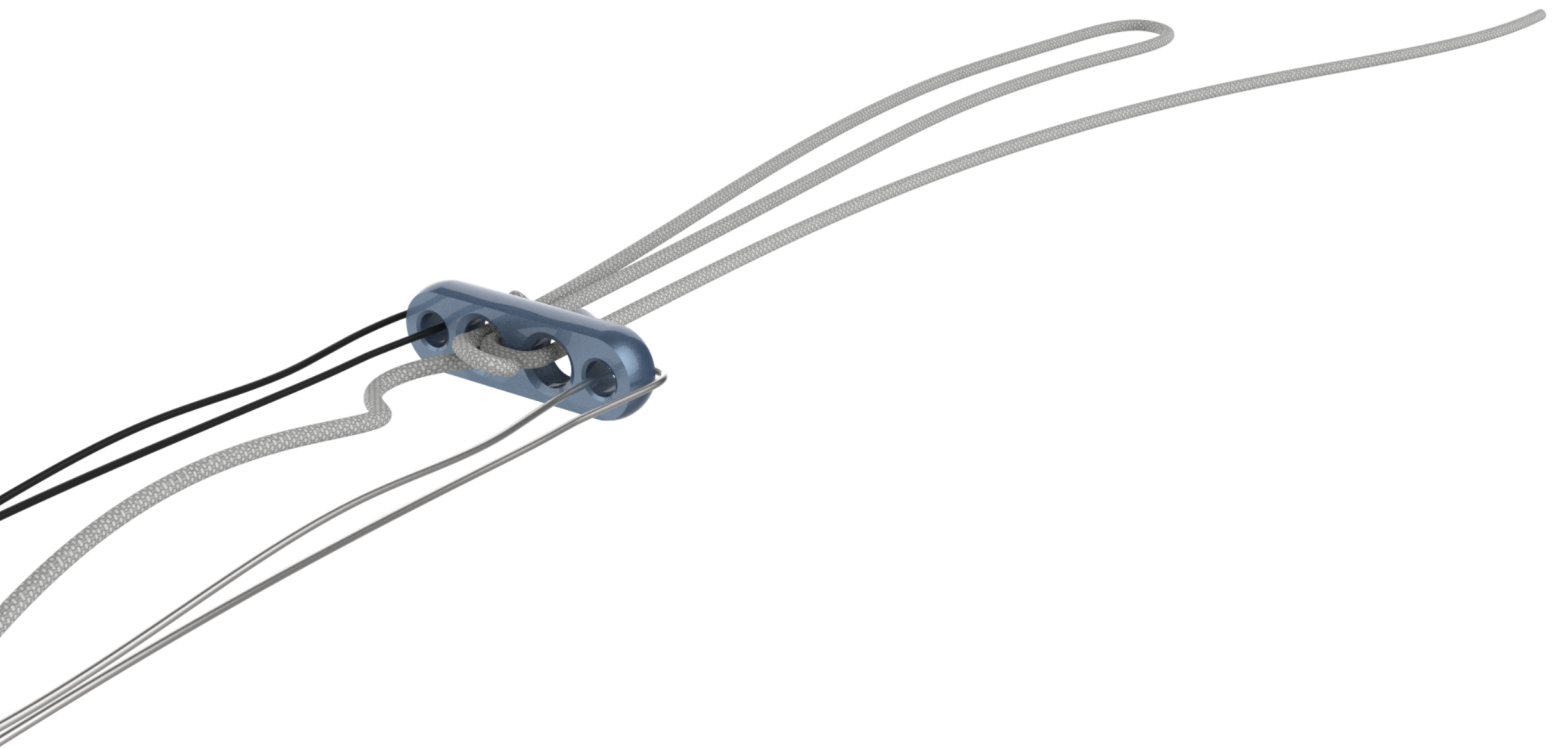

1

Una vez preparado el injerto HTH, proceder a ensamblar el sistema de Endobutton autoajustable.

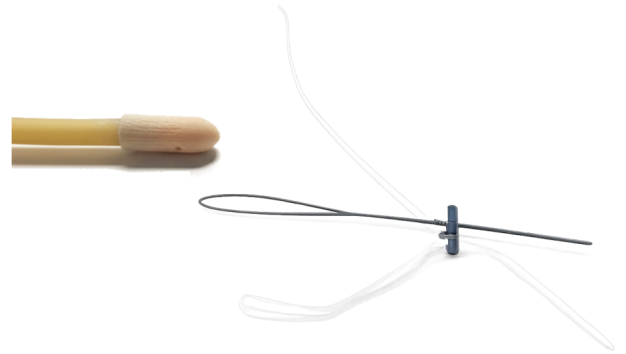

2

Atravesar el loop del sistema a través del orificio del taco óseo femoral del injerto HTH. Para esta maniobra, utilizar como asistencia un pasahilo (negro)

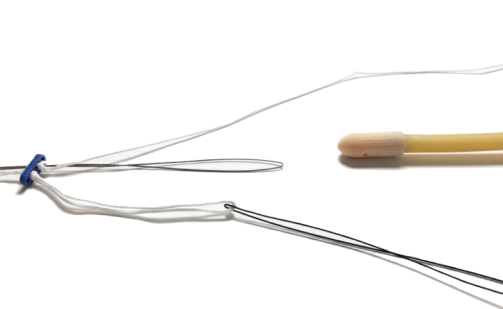


Imagen 1

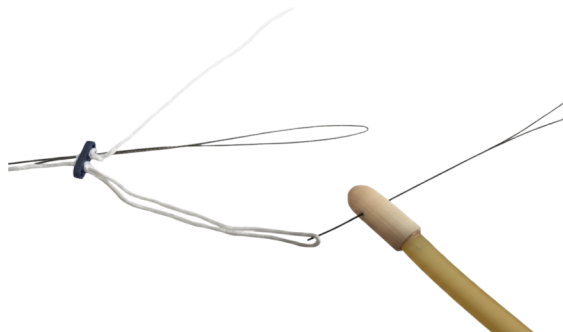


Imagen 2

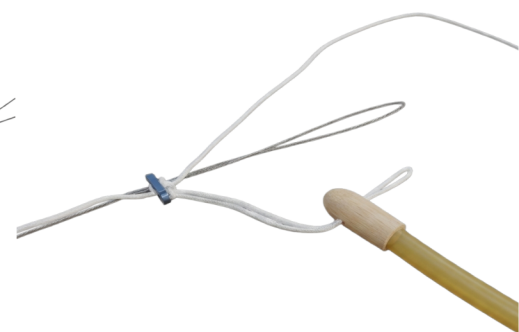


Imagen 3

3

Tras atravesar el taco óseo, completar el armado del segundo loop. Para ello, pasar el cabo del extremo opuesto a través del ojal formado, enhebrándolo en el pasahilo (gris).

Traccionar firmemente en todo su recorrido para atravesar el Endobutton.

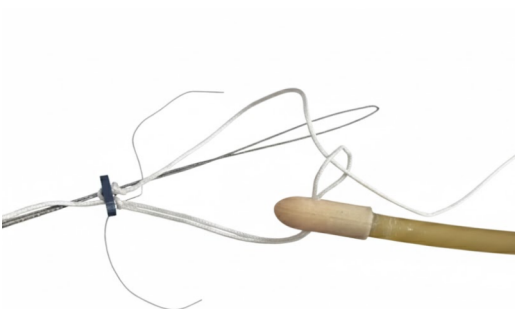


Imagen 4

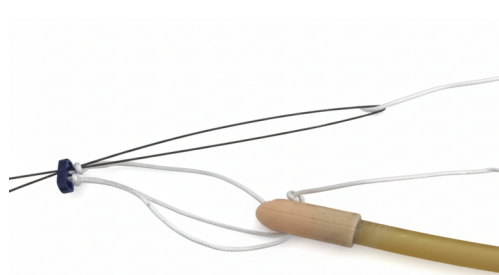


Imagen 5

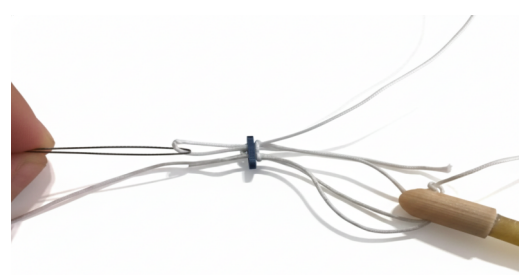


Imagen 6

4

Con ambos loops entrelazados a través del taco óseo, acomodar el largo de forma individual traccionando hasta alcanzar una extensión aproximada de 30 mm.



Imagen 7




Imagen 8

5

Realizar una traba de seguridad por encima del botón mediante la ejecución de un nudo, tal como se ilustra en la imagen 8 de la referencia.

6

Finalizado el ensamblado, colocar el cable (negro/plateado o únicamente negro) para proceder al pasaje del implante con el injerto a través de los túneles quirúrgicos.

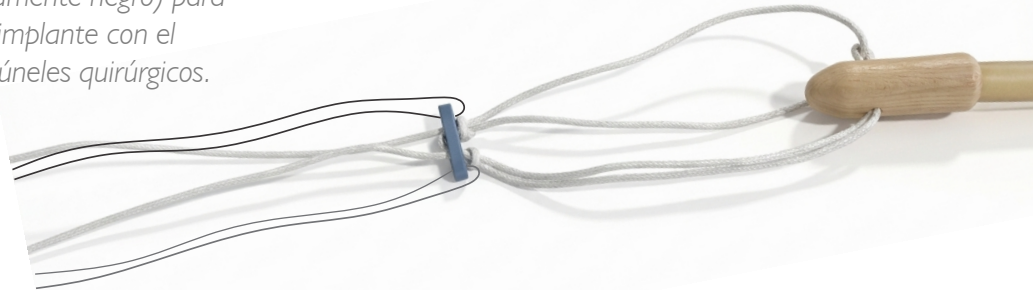


Implante

Endobutton HTH

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 01 - 005 - 05

La presente técnica es una herramienta de educación y orientación para el médico y/o personal de salud que desee realizar la cirugía. Los profesionales médicos deberán utilizar sus conocimientos en el campo y su experiencia para poder implementarla correctamente, así como también ser capaces de llevar adelante un seguimiento post-operatorio del paciente.

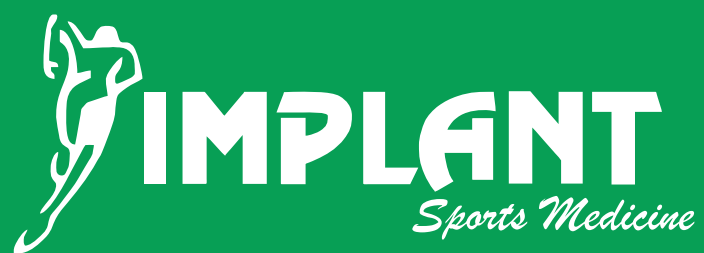

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA
Tel: +54 351 4601050
implant@implantca.com

www.implantca.com.ar