




BROCHURE + TÉCNICA QUIRÚRGICA

MIR III - Sutura meniscal ALL INSIDE

Sistema de sutura meniscal All-Inside.

Solución integral para la reparación y preservación del tejido meniscal.

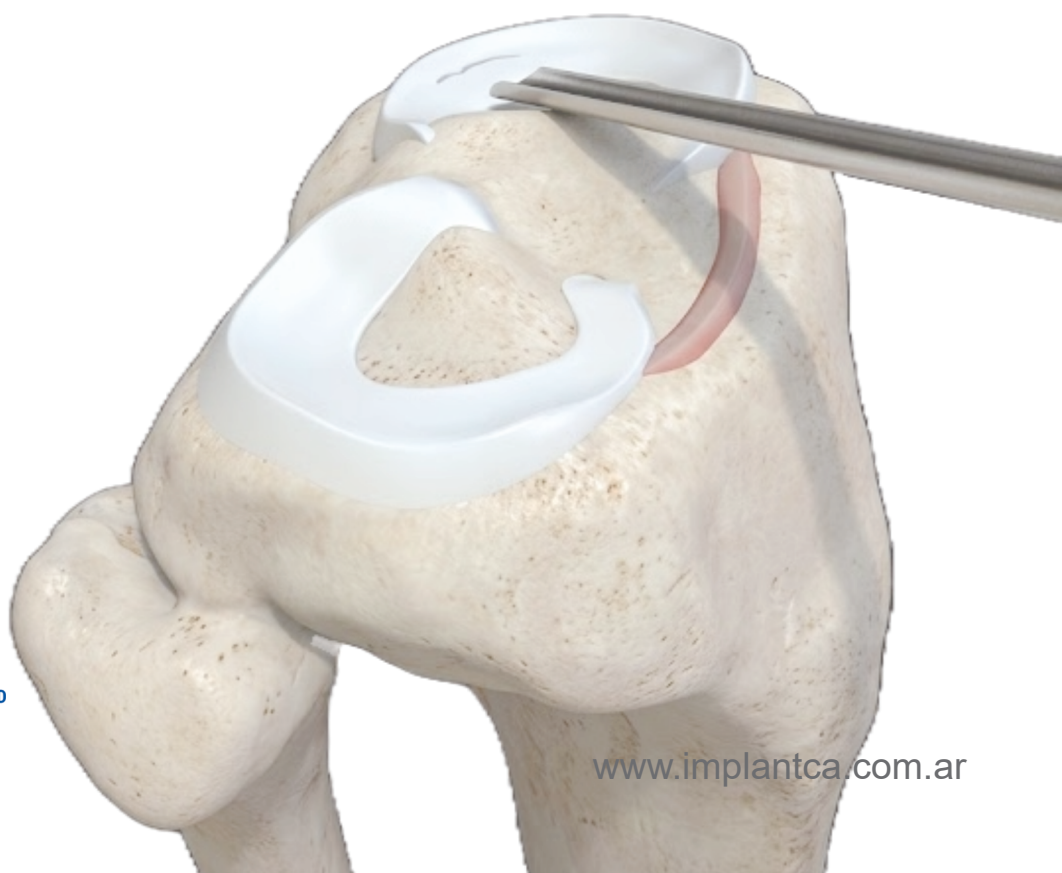


GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

www.implantca.com.ar

► Caja SUTURA MENISCAL

Caja instrumental de sutura meniscal diseñada para reparación artroscópica de meniscos, con instrumental para pasaje dirigido de suturas, captura de tejido y fijación meniscal. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.

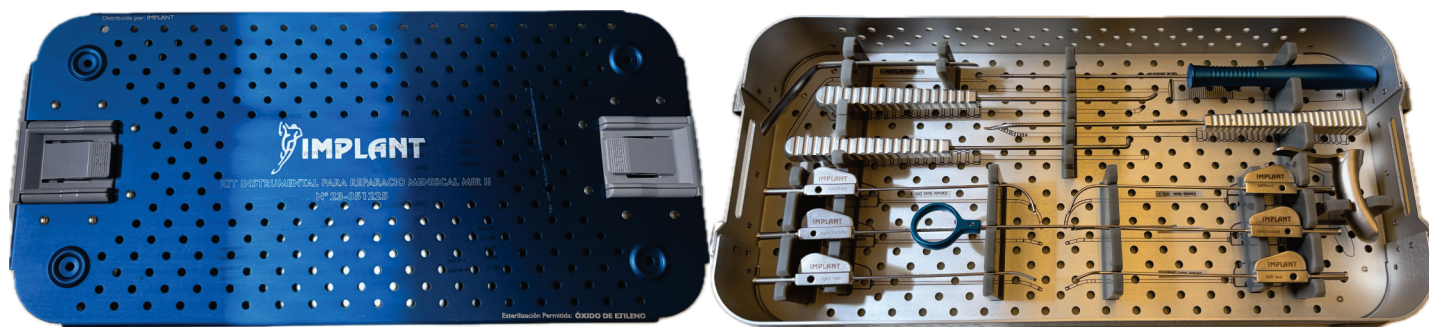

Canula guía aguja de
sutura meniscal 90°
izquierdo y derecho



Canula guía aguja de
sutura meniscal 60°
izquierdo y derecho



Canula guía aguja de
sutura meniscal 25°
izquierdo y derecho



Lima meniscal a 45° y 90°




Medidor de longitud de menisco



Corta sutura cal 2-0



Guía introducción sutura all inside

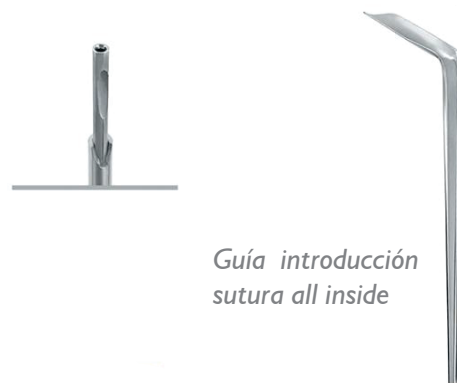

Protector meniscal doble de aguja




BAJA NUDO CAL 2-0



Para deslizar y asentar nudos de sutura en el sitio quirúrgico.
Longitud: 165 mm — Diámetro: 0.9 mm

Pinza pasa sutura rodilla tipo escorpion

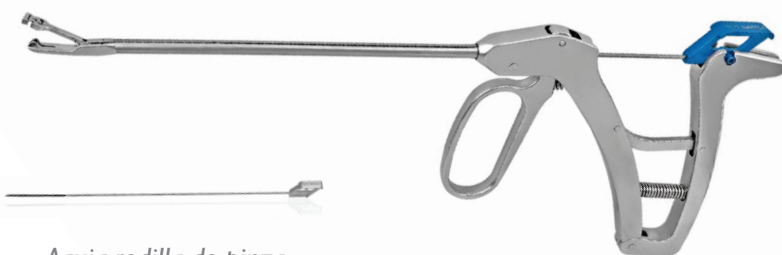


Aguja rodilla de pinza tipo escorpion



Sistema Sutura meniscal ALL INSIDE - **MIR 3**

El dispositivo MIR 3 ofrece una solución integral para la reparación meniscal All-Inside. Viene precargado con sutura de UHMWPE multifilamento y doble implante en PEEK. Cuenta con un mango de agarre anatómico que incluye indicador visual de penetración y feedback sonoro en cada activación.

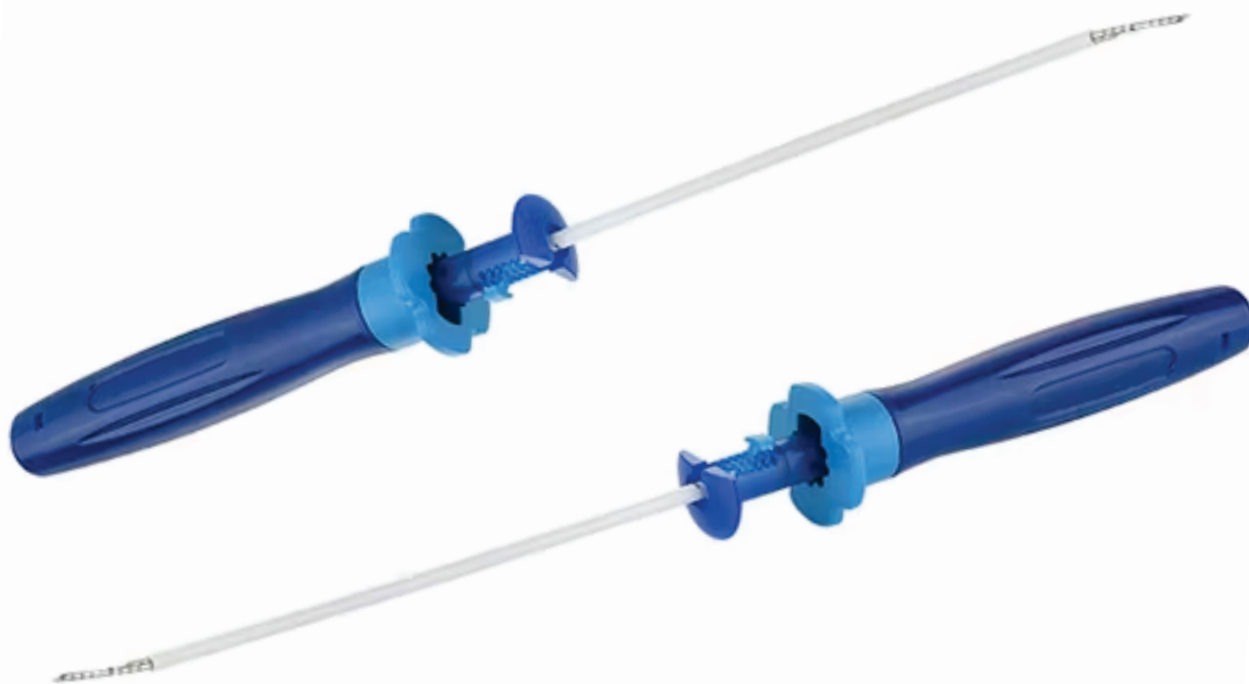

Diseño versátil de punzón que permite un abordaje multiangular según el requerimiento de la lesión meniscal.

- **Anclaje seguro y confiable:** Los botones en PEEK aseguran una retención meniscal óptima y previenen el aflojamiento prematuro del hilo de sutura.
- **Control de profundidad dinámico:** Facilita el cambio gradual del tope de seguridad sin requerir modificaciones ni cortes en la funda exterior.
- **Eje giratorio de 360°:** Otorga la máxima agilidad operativa al cirujano, asegurando una inserción fluida y precisa en cualquier cuadrante meniscal.

PASO 1

Medición del menisco:

1. Medir el menisco con la ayuda del medidor o las marcas láser del dispositivo.
2. Asegurarse de ajustar el tope de profundidad, dejando 2 mm adicionales para que el implante se despliegue en la capsula articular.



PASO 2

Ajuste de profundidad:


Ajustar la profundidad deseada moviendo la tecla gris hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde se realizará el primer punto.



PASO 3

Colocación de la guía:



Insertar por el portal de ingreso a la articulación una guía de media caña.

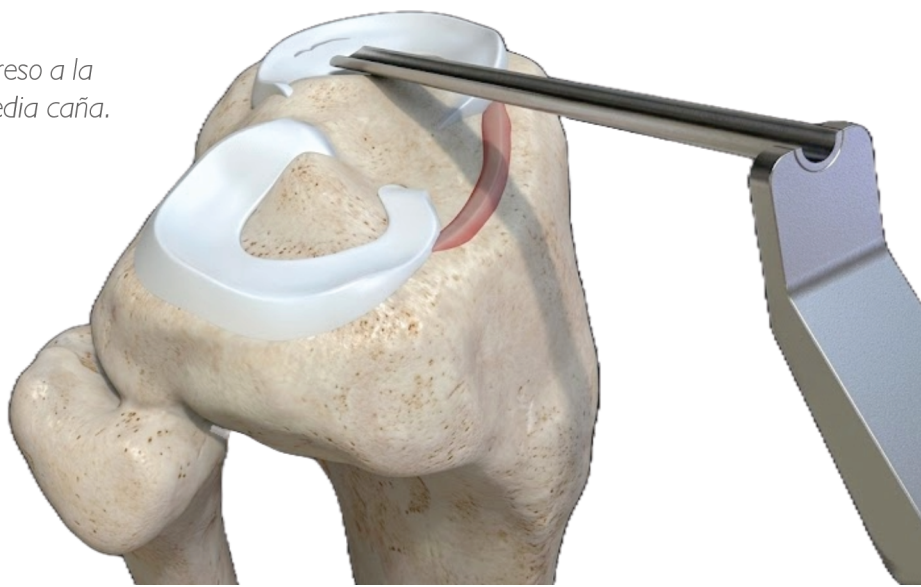

PASO 4

Posicionamiento del dispositivo:


1. Colocar la aguja sobre la guía y llevar el dispositivo hacia abajo hasta llegar a la lesión del menisco.
2. Rotar el dispositivo dentro de la articulación y retirar la guía.
3. Avanzar con el dispositivo, haciendo progresar la aguja en el menisco hasta alcanzar la profundidad deseada.

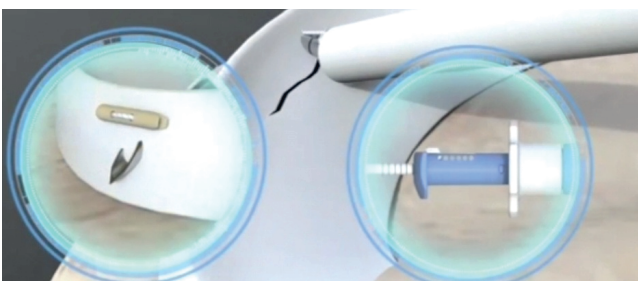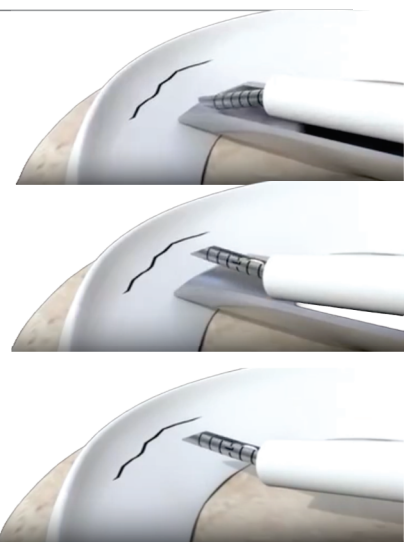

PASO 5

Inserción de los implantes:


1. Estando en posición, con la ayuda del pulgar, presionar el gatillo (blanco) hasta escuchar el primer click, lo que indica que el primer implante ha salido del dispositivo.
2. Traccionar hacia atrás, liberando el hilo y posicionando la aguja para profundizar en el menisco.
3. Con el dedo pulgar, accionar el gatillo nuevamente hasta escuchar el segundo click, indicando que el segundo implante está detrás de la cápsula.

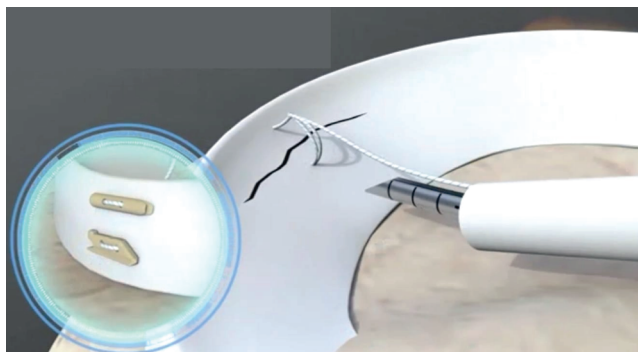

PASO 6

Tensión del hilo:

Usar un bajo nudo para dar tensión al hilo sin generar demasiada fuerza y cortar el hilo sobrante utilizando una pinza corta sutura.

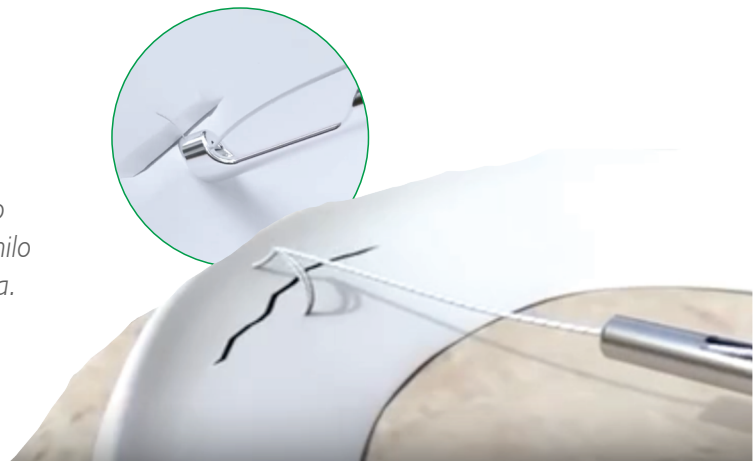



**GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS**
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar